

Istruzioni di utilizzo mascherina medico-chirurgica lavabile



Prima di indossare le mascherine,
lavarsi sempre le mani !

MASCHERINA TIPO CHIRURGICO LAVABILE

Assieme alla maschera vengono consegnati due tipi di sacchetti aventi funzioni diverse:

- di riponimento, dotata di fascia richiudibile, quando si decide eventualmente di riporla per poi riutilizzarla
- di lavaggio, aperto, quando si decide di avviarla alla fase di lavaggio.

E' opportuno provvedere al lavaggio della mascherina ogni sera, secondo le modalità indicate dal produttore e allegate.

Va sempre verificata l'integrità della maschera prima di indossarla.

Come indossarla:

1. La mascherina va presa per gli elastici con mani pulite evitando di toccare con le mani la parte filtrante
2. Posizionare la maschera con cura in modo tale che aderisca il più possibile a bocca, naso e mento

Quando indossarla:

- Da quando si scende dalla vettura o si entra dal cancello fino al termine della giornata lavorativa, quando si sale sulla vettura o usciti dal cancello
- Sempre in ufficio, se ci si trova in open space o se si condivide l'ufficio in numero maggiore di 1.
- Sempre durante gli spostamenti fuori dall'ufficio (es. quando si va in bagno, in mensa, ecc.)

Durante l'uso:

Evitare di toccare direttamente la parte filtrante: manipolarla prendendola solo per il laccio o l'elastico e comunque sempre avendo prima effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.

Qualora fosse necessario toglierla per poi indossarla nuovamente, (ad. esempio quando si è in ufficio da soli) riporla temporaneamente nel sacchetto con la zip consegnato insieme alla maschera in modo da evitare il contatto con altre superfici (sacchetto di riponimento)

Come toglierla:

- Rimuovere la maschera prendendola solo per il laccio o l'elastico evitando di toccare la parte filtrante;
- Lavare le mani usando detergente a base di alcol o con acqua e sapone

Come lavarla a casa di ogni lavoratore (ogni lavoratore dovrà curarne la pulizia a casa sua):

Si riportano di seguito le indicazioni della casa produttrice



PROTOCOLLO PER IL CORRETTO LAVAGGIO E RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE MODELLO NCN MR2

PREMESSA

Tale istruzioni servono esclusivamente per il corretto riutilizzo e lavaggio delle mascherine facciali attualmente denominate NCN MR2 di colore nero.

UTILIZZO CONSIGLIATO DELLA MASCHERINA NCN MR2

Il prodotto NCN MR2, così come indicato nella scheda tecnica è un Medical Device di Classe I, destinato all'uso protettivo, da parte di chi lo indossa, verso "droplets" potenzialmente contaminanti da batteri e non; il suo utilizzo è consentito in tutti gli ambienti che non prevedono condizioni di sterilità o condizioni di utilizzo ospedaliero in ambienti confinati.

TEMPO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Il prodotto NCN MR2, per le sue caratteristiche può essere utilizzato in maniera continuativa, tuttavia in ambienti applicativi con temperatura ambiente elevata e/o con elevati tenori di umidità, potrebbe essere necessario interromperne l'utilizzo ogni 3 ore, in maniera tale da evitare una eccessiva sudorazione con conseguente fastidio nell'indossarla.

FREQUENZA DI LAVAGGIO CONSIGLIATO

- Per utilizzi non continuativi (tempo di utilizzo fino a 3 ore non continuative al giorno): Rateo di lavaggio consigliato: 1 (una) volta a settimana
- Per utilizzi continuativi (tempo di utilizzo fino a 6 ore continuative al giorno): Rateo di lavaggio consigliato: 1 (una) volta al giorno
- Per utilizzi continuativi (tempo di utilizzo oltre le 6 ore continuative al giorno): Rateo di lavaggio consigliato: 1 (una) volta al giorno

NUMERI MASSIMO DI LAVAGGI CONSIGLIATI

- N. 30 (trenta)

METODI DI LAVAGGIO CONSIGLIATO

Il prodotto NCN MR2, può essere lavato, con i seguenti metodi:

- Lavaggio a mano o in lavatrice ad una temperatura di 30°C con sapone neutro e con l'utilizzo di un igienizzante per tessuti attivo a bassa temperatura (max 30°C), liquido e/o in tabs tipo Napisan©
- Lavaggio in caldaia di lavaggio industriale con vapore saturo massimo a 121°C e una pressione massima di 1,1 bar per un tempo massimo di 15 minuti e SENZA l'utilizzo di mezzi chimici come perossido di idrogeno, ossido di etilene o acido peracetico

ATTENZIONE: Il prodotto non può essere riutilizzato né lavato se macchiato da liquidi organici come vomito, sangue, urina e/o da ingredienti alimentari come burro, olio, cioccolato, vino, liquori e/o da grassi e/o altri lubrificanti da lavoro.

Nota Generale:

- Per entrambi i metodi di lavaggio indicati si consiglia di riutilizzare il prodotto solo dopo accurata asciugatura ottenuta naturalmente o con aria calda; non asciugare il prodotto con forno a micro-onde o forno statico
- Il prodotto non perde la sua efficacia se, dopo numerosi lavaggi, dovesse presentare una perdita del colore originale